


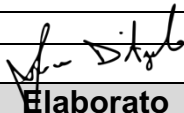

Via Ponte San Giovanni, 36
67100 – Sassa (AQ)

| | | |
|---|-----------------|--|
| ISTRUZIONE SICUREZZA E AMBIENTE | Copia n° | |
| <i>“Coronavirus: Corretto Uso dei DPI (mascherine, guanti ed occhiali)”</i> | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|--|-------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 00 | 12/10/2020 | Prima emissione |  | | |
| Rev. | Data | Motivo della Revisione | Elaborato | Verificato | Approvato |

A cura della



Safety Services

Servizi integrati Sicurezza Ambiente e Qualità

Corso Vittorio Emanuele II, 23 - 67100 L'Aquila - Tel. e Fax 0862.27367 www.safetyservices81.com

| | | |
|---|--|----------|
| “Puli Service S.r.l.” Via Ponte San Giovanni n°36 67100 – Sassa (AQ) | ISTRUZIONE SICUREZZA E AMBIENTE | Rev. 00 |
| | <i>Coronavirus: Corretto Uso dei DPI (mascherine, guanti ed occhiali)</i> | Pag. 2/8 |

SOMMARIO

| | | |
|--------------|---|----------|
| 1 | SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 2 | MASCHERINE: TIPOLOGIE E MODALITA' DI IMPIEGO | 3 |
| 2.1 | TIPOLOGIA DI MASCHERINE | 3 |
| 2.1.1 | MASCHERINA CHIRURGICA | 3 |
| 2.1.2 | MASCHERINE FFP1, FFP2, FFP3 | 4 |
| 2.2 | MODALITÀ D'USO..... | 4 |
| 3 | GUANTI MONOUSO..... | 6 |
| 3.1 | PROCEDURA PER METTERE E TOGLIERE I GUANTI MONOUSO NON STERILI..... | 6 |
| 4 | OCCHIALI PROTETTIVI | 7 |
| 5 | SCHEMA DI PROCEDURA DA SEGUIRE..... | 8 |
| 6 | GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI | 8 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| <p>“Puli Service S.r.l.” Via Ponte San Giovanni n°36 67100 – Sassa (AQ)</p> | <p>ISTRUZIONE SICUREZZA E AMBIENTE</p> | <p>Rev. 00</p> |
| | <p><i>Coronavirus: Corretto Uso dei DPI (mascherine, guanti ed occhiali)</i></p> | <p>Pag. 3/8</p> |

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente Istruzione è quello di definire le corrette modalità di impiego dei DPI forniti al personale (guanti, mascherine ed occhiali).

L'Istruzione fornisce, inoltre,

- ulteriori indicazioni e cautele procedurali nell'impiego di tali DPI utili ad affrontare in maniera corretta l'emergenza coronavirus
- indicazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti legate all'uso di tali DPI.

2 MASCHERINE: TIPOLOGIE E MODALITA' DI IMPIEGO

2.1 Tipologia di mascherine

Seguendo le disposizioni delle Autorità, le mascherine da adottare sono quelle di seguito riportate

2.1.1 Mascherina Chirurgica

Una maschera (o mascherina) chirurgica, nota anche come maschera medica o maschera facciale per uso medico è un presidio destinato a essere indossato dagli operatori sanitari durante un intervento chirurgico o altre attività in ambito sanitario al fine di evitare la dispersione di agenti patogeni (quali ad esempio batteri o virus) dispersi in goccioline liquide (droplets) e aerosol che possono fuoriuscire dalla bocca e dal naso di chi la indossa.



Purtuttavia in conformità al Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) all'art. 16 comma 1 le mascherine chirurgiche sono **equiparate a DPI**, per cui possono essere utilizzate in situazione “normali” di lavoro.

| | | |
|--|--|-----------------|
| <p>“Puli Service S.r.l.” Via Ponte San Giovanni n°36 67100 – Sassia (AQ)</p> | <p>ISTRUZIONE SICUREZZA E AMBIENTE</p> | <p>Rev. 00</p> |
| | <p><i>Coronavirus: Corretto Uso dei DPI (mascherine, guanti ed occhiali)</i></p> | <p>Pag. 4/8</p> |

2.1.2 Mascherine FFP1, FFP2, FFP3

La mascherine FFP1 sono Marcate CE in accordo al Reg. (UE) 2016/425 ed alla norma tecnica EN 149:2009 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura”.




Sono previste 3 classi:

- **FFP1** (efficienza filtrante del 78%)
- **FFP2** (efficienza filtrante del 92%)
- **FFP3** (efficienza filtrante del 98%)

Tuttavia, per la protezione personale da virus sono consigliate le FFP2 e le FFP3.

2.2 Modalità d'uso

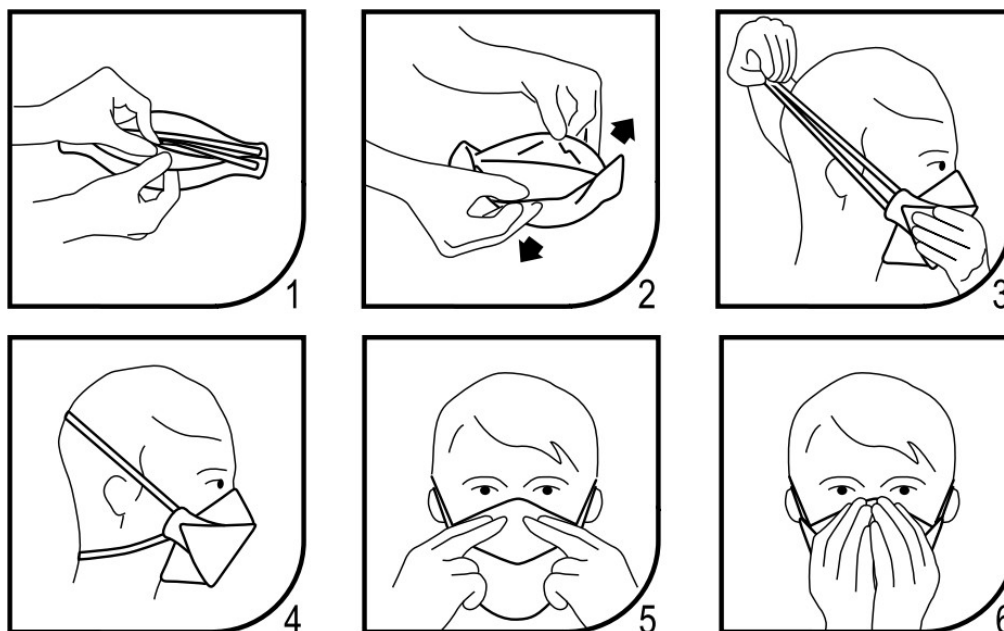

Prima di indossare la mascherina lavarsi accuratamente le mani con un detergente a base di alcol o acqua e sapone

- 1) Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.
- 2) Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.

| | | |
|---|---|----------|
| “Puli Service S.r.l.” Via Ponte San Giovanni n°36 67100 – Sassa (AQ) | ISTRUZIONE SICUREZZA E AMBIENTE | Rev. 00 |
| | <i>Coronavirus: Corretto Uso dei DPI (mascherine, guanti ed occhiali)</i> | Pag. 5/8 |

- 3) Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.
- 4) Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
- 5) Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
- 6) Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta.

| ATTENZIONE | |
|---|---|
| ASSICURARSI CHE IL VISO SIA PULITO E RASATO. I RESPIRATORI NON DEVONO ESSERE INDOSSATI IN PRESENZA DI BARBA, BAFFI E BASETTE CHE POSSONO IMPEDIRE UNA BUONA ADERENZA AL VISO |  |
| ASSICURARSI CHE I CAPELLI SIANO RACCOLTI INDIETRO E NON CI SIANO GIOIELLI CHE INTERFERISCONO CON IL BORDO DI TENUTA DEL RESPIRATORE |  |
| TOGLIERE LA MASCHERINA (MONOUSO) DA DIETRO (SENZA TOCCARE LA PARTE ANTERIORE) E BUTTARLA IMMEDIATAMENTE IN UN CONTENITORE CHIUSO; PULIRE LE MANI CON UN DETERGENTE A BASE DI ALCOOL O ACQUA E SAPONE |  |
| LA DURATA DELLE MASCHERINE MONOUSO DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DI MATERIALE FILTRANTE. SOSTITUIRE LA MASCHERINA CON UNA NUOVA NON APPENA È UMIDA E NON RIUTILIZZARE QUELLE MONOUSO |  |
| CONSERVARE LE MASCHERE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE |  |
| NON LASCIARE LA MASCHERA ESPOSTA A POLVERI, LIQUIDI, AGENTI CONTAMINANTI. IN CASO SI VOGLIA TOGLIERE LA MASCHERA CONSERVARLA SOLO IN APPOSITI CONTENITORI O SECONDO ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE |  |

| | | |
|---|--|-----------------|
| <p>“Puli Service S.r.l.” Via Ponte San Giovanni n°36 67100 – Sassa (AQ)</p> | <p>ISTRUZIONE SICUREZZA E AMBIENTE</p> | <p>Rev. 00</p> |
| | <p><i>Coronavirus: Corretto Uso dei DPI (mascherine, guanti ed occhiali)</i></p> | <p>Pag. 6/8</p> |

3 GUANTI MONOUSO

L'uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. **Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio.** L'Istituto superiore di sanità (ISS) ci fornisce le indicazioni per un loro utilizzo corretto che di seguito si riporta:

I guanti vanno indossati a patto che:

- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e pe 60 secondi;
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei contenitori dei rifiuti;
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- siano eliminati al termine dell'uso;
- non siano riutilizzati.

3.1 Procedura per mettere e togliere i guanti monouso non sterili

- 1) Operare la pulizia o il lavaggio delle mani dell'operatore
- 2) Rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente evitando la contaminazione dei guanti posti più in basso. Se la procedura da eseguire richiede il cambio dei guanti e si dovesse rendere necessario utilizzare più di due guanti, tutti quelli necessari devono essere prelevati prima dell'inizio della procedura di assistenza
- 3) Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, facendo attenzione a non contaminare il guanto con contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è particolarmente importante quando si calza il secondo guanto: in questo momento la mano già coperta dal primo guanto può toccare la pelle della mano non coperta se non si prendono precauzioni
- 4) Durante l'impiego può essere necessario cambiare i guanti I guanti sono prodotti monouso e non devono essere puliti e riutilizzati
- 5) Se il guanto si danneggia durante l'uso, deve essere sostituito
- 6) Rimuovere i guanti quando la procedura è stata completata, facendo attenzione a non contaminare le mani o per l'ambiente toccando la parte esterna dei guanti usati
- 7) Rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da rovesciarlo una volta rimosso
- 8) Rimuovere il secondo guanto facendo scivolare le dita della mano non protetta all'interno del polso del guanto sfilandolo in modo tale che sia rovesciato
- 9) Smaltire i guanti utilizzati buttandoli negli appositi contenitori dei rifiuti presenti in sede/cantiere
- 10) Dopo aver rimosso i guanti, pulire e decontaminare le mani mediante il lavaggio delle stesse.



| | | |
|--|---|----------|
| “Puli Service S.r.l.” Via Ponte San Giovanni n°36 67100 – Sassa (AQ) | ISTRUZIONE SICUREZZA E AMBIENTE | Rev. 00 |
| | <i>Coronavirus: Corretto Uso dei DPI (mascherine, guanti ed occhiali)</i> | Pag. 7/8 |

4 OCCHIALI PROTETTIVI

Le tipologie di occhiali protettivi che possono essere impiegati nel corso delle lavorazioni sono le seguenti:

- Occhiali per protezione da polveri, spruzzi e liquidi
- Occhiali per protezione da schegge
- Occhiali e schermi per saldatori
- Visiera per protezione del volto




Nell'utilizzo dei mezzi di protezione per occhi e volto è necessario seguire i seguenti comportamenti:

- pulire costantemente gli occhiali e le visiere secondo le modalità indicate dal produttore;
- conservare gli occhiali e le visiere in luogo opportuno;
- controllare l'integrità degli occhiali e delle visiere prima dell'utilizzo;
- utilizzare sistematicamente le protezioni.

| | | |
|---|--|-----------------|
| <p>“Puli Service S.r.l.” Via Ponte San Giovanni n°36 67100 – Sassa (AQ)</p> | <p>ISTRUZIONE SICUREZZA E AMBIENTE</p> | <p>Rev. 00</p> |
| | <p><i>Coronavirus: Corretto Uso dei DPI (mascherine, guanti ed occhiali)</i></p> | <p>Pag. 8/8</p> |

5 SCHEMA DI PROCEDURA DA SEGUIRE

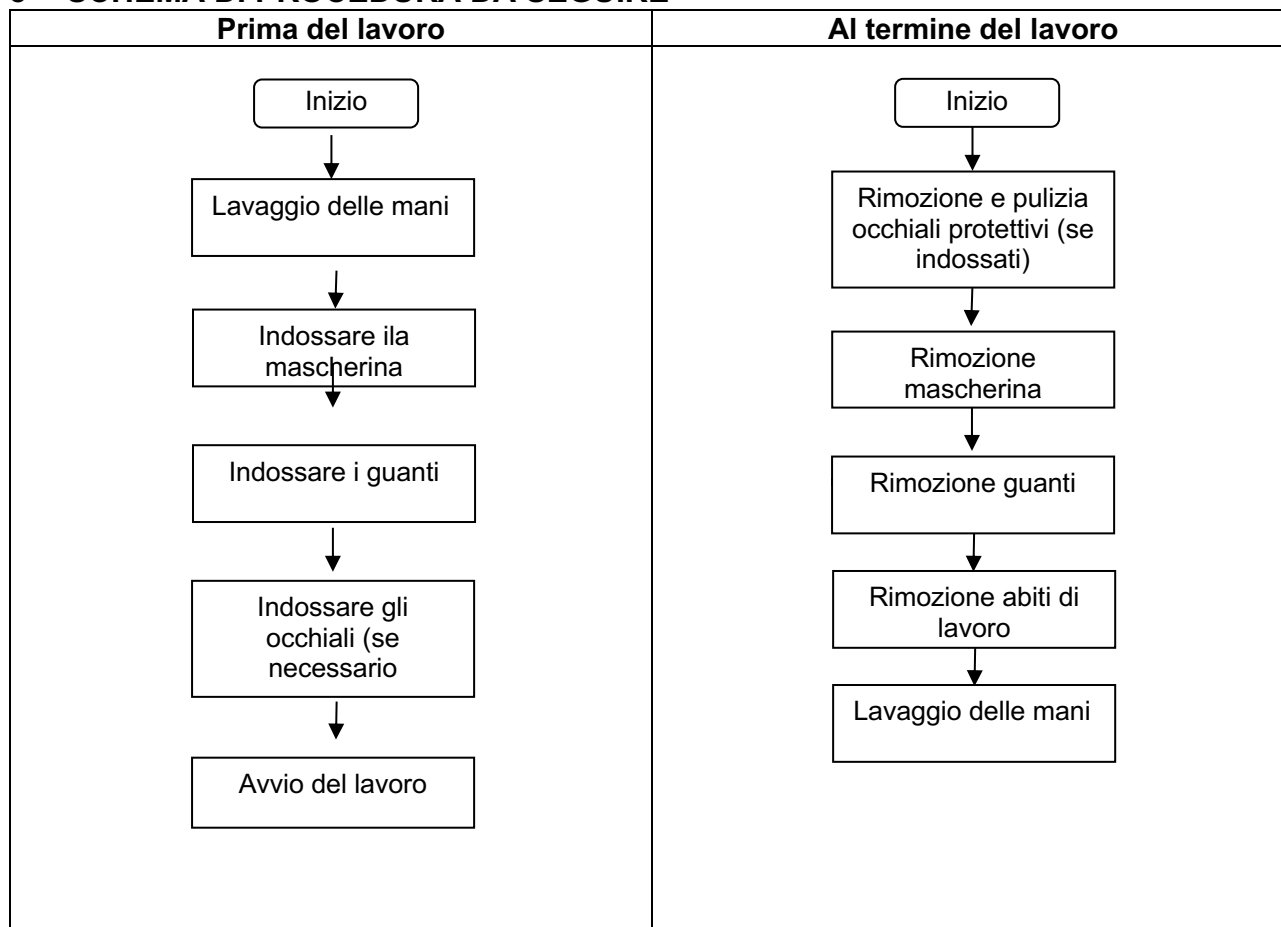

6 GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI

Al termine del lavoro e ogni qual volta si sostituiscono i guanti monouso, le mascherine ed i guanti impiegati vanno buttati in contenitori dedicati messi a disposizione sui luoghi di lavoro.

Qualora il comune della scrivente non accettasse i DPI utilizzati in doppia busta nell'indifferenziato, il codice CER con cui vanno smaltite è il 150202*.